

Visalys Whitening 7,5

Valkaisugeeli. Vetyperoksidi 7,5 %
pitoisuus. Käytetään vitaalin ja ei-vitaalin
hampaiden valkaisuun.

HUOM! Visalys-tuotteita saa käyttää vain
hammaslääkärin opastuksen jälkeen.



CE 0123

LUE OHJEET HUOLELLISESTI!

Käyttöohjeet.

Puhdista hampaat huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa.
Kierrä muovista korkkia vastapäivään ja poista korkki. (Ohjeen kuva 1.)
Kiinnitä sekoituskärki paikalleen. Poista sekoituskärjen korkki.
Pakkaus sisältää yhden uudelleenkäytettävän sekoituskärjen.

Täytä valkaisuusikka jokaisen valkaistavan hampaan osa **tipalla valkaisuainetta**. Täytä lusikkaa alkaen takimmaisesta hampaasta.
Ruiskuun on merkitty 12-osainen mitta-asteikko.
Asteikon kaksi mittayksikköä riittää yhteen kokonaiseen valkaisuusikkaan. Mikäli valkaistaan vain tiettyjä hampaita, täytä lusikka hammaslääkärin ohjeiden mukaan.

Älä ylitäytä valkaisuusikkaa, koska aine saattaa ärsyttää ikeniä.
Sulje korkki paikalleen valkaisuusikkaan annostelun jälkeen. Poista sekoituskärki ja aseta läpinäkyvä suojakorkki paikoilleen, näin varmistetaan valkaisuaineen teho varastoinnin jälkeen.

Aseta täytetty valkaisuusikka hampaalle ja poista ylimäärä geeli sormella tai hammasharjalla. Pese kätesi huolellisesti geelin käsittelyn jälkeen.
Valkaisuusikkaa tulisi käyttää 2 x 30 min jaksoa päivässä, mutta ei koskaan pidempää kuin yhden (1) tunnin. Älä syö, juo tai tupakoi valkaisuun aikana. Vältä sitruhedelmien nauttimista, koska ne saattavat lisätä jälkiherkkyyttä.

Hoidon kesto

2 x 30 minuutin valkaisuua päivässä. Ei koskaan enempää kuin tunti.
Suosittelemme valkaisuua aamulla ja illalla. Valkaisukertojen välillä tulee olla vähintään kaksi (2) tuntia.
Valkaisu aika riippuu halutusta valkaisu tuloksesta. Potilaspakkauksessa riittää ainetta 12 päivän valkaisuun. Pidempi valkaisu aika voidaan suorittaa vain lääkärin konsultoinnin jälkeen. Mikäli hoidon aikana esiintyy jälkivihiä, vähennä valkaisu kertoja yhteen päivässä. Mikäli valkaisu kertoja jää pois, pidennä hoitojaksoa tarpeen mukaan.

Valkaisuun jälkeen

Poista valkaisuusikka 30 min jälkeen. Huuhtelee suusi hyvin ja poista jäännösgeeli hampailta ja ikeniltä hammasharjalla.
Huuhtelee valkaisuusikka kylmällä vedellä. Poista jäännösgeeli lusikasta hammasharjalla. Anna kuivua. Älä käytä kuumaa vettä, koska se saattaa muuttaa valkaisu muotoon. Laita valkaisuusikka paikalleen Visalys Patient Kit -koteloon ja säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
Varmista, että huolehdi hyvää suun hygieniasta hoidon aikana.
Toista toimenpiteet jokaisen valkaisu kerran jälkeen.
Mikäli tunnet valkaisuun aikana muita tuntemuksia kuin lievää vihiä, keskeytä hoito ja konsultoi lääkäriäsi.

Älä käytä jos,

- olet raskaana tai rintaruokitsit
- olet yliherkkä vetyperoksidille tai karbamidiperoksidille
- olet diabeetikko
- olet alle 18-vuotias
- värjäytymät voidaan poistaa puhdistamalla tai hiomalla.
- olet yliherkkä vihiä hoidon aikana.

Sivuvaikutukset

- Tilapäinen ikenien ja pehmytkudosten ärtyminen.
 - Tilapäinen hampaiden herkkyyden aleneminen
 - Tilapäinen hampaiden läpikuultavuuden aleneminen
 - Tilapäinen hampaan halkeaman vastustuksen aleneminen
 - Tämä tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion yliherkälle käyttäjälle
- Tilapäisiä sivuvaikutuksia voidaan lieventää perus hammashoidoilla, esim. hampaiden fluoraamisella.

Yleistä

Kahvin, kolajuomien, tupakan ja viinin nauttimista tulee välttää koko hoidon ja hoidon jälkeisen ajan.
Väliaikaiset paikat saattavat muuttaa sävyä. Konsultoi hammaslääkäriäsi tästä. Korostuneet valkoiset läikät tai viivat hampaissa johtuvat kiilteen kuivumisesta. Niiden tulisi hävitä kahdenviikon sisällä hoidon lopettamisesta. Huom. Paikat eivät valkaistu hoidon aikana vaan säilyttävät alkuperäisen sävynsä. Paikat joudutaan tarvittaessa uusimaan.
Amalgaamipaikat muuttuvat tummiksi hapettumisen johdosta. Kuplien muodostuminen valkaisuun aikana on normaalia. Hampaat saattavat olla vaaleampia heti hoidon jälkeen. Lopullinen sävy saavutetaan n. kahdessa viikossa. Tämä on syytä ottaa huomioon hampaanväristen restauroitoiden suunnitteluvaiheessa. Hampaiden uudelleenvärjäytyminen voidaan ehkäistä uusimalla valkaisu. Mikäli sinulla on kysymyksiä valkaisuusta, ota yhteys hammaslääkäriäsi.

Turvaohjeet

Ennen valkaisuua tulisi hoidattaa kariesleesiot ja muut valkaisuun vaikuttavat hoidot. Paljastuneet kervikaaliset alueet tulee peittää sopivalla aineella esim. resiniadhesiivillä tai valkaisuusikkaa pitää lyhentää. Hoitoa voidaan vähentää yhteen kertaan päivässä, mikäli jälkiherkkyyttä esiintyy lisääntyneesti. Hampaat voidaan myös fluorata. Jälkiherkkyyttä kestää yleensä muutaman päivän hoidon päättymisestä. Mikäli ienäräytystä esiintyy, tarkista ettei ainetta annostella liikaa lusikkaan. Tarvittaessa keskeytä valkaisuhoito ja käänny lääkäriäsi puoleen.

Varoitukset!

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Vältä kosketusta vaatteisiin.

Säilytys

Säilytä viileässä (18 - 25 astetta). Ei saa jäätyä.
Viimeinen käyttöpäivä, katso ruiskun painatus.

Sisältö.

1 valkaisuaineriisku, 1 sekoituskärki.

Valmistaja

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7 Kettenbach LP
35713 Eschenburg, Germany
www.kettenbach.com

Distributed in U.S. by:
7777 Center Avenue, Suite 280
Huntington Beach, CA 92647
USA

Maahantuonti:
Kompodent
Kappelikatu 11
45130 KOUVOLA
Finland